

# Handleiding voor het exact meten voor Juzo® teenkappen

## Let op:

- De voet moet maximaal oedeemvrij zijn.
- Geef de maten op de **millimeter nauwkeurig** op.

Bij het dragen van een compressiekous moeten kous en voet-tenen deel minstens 3 cm overlappen.

Het meetpunt "A" moet de compressie **kous** en het teenstuk minstens 3 cm distaal van het meetpunt "A'" van het teenkap.

## Omvangsmaten

De omvang steeds loodrecht op de lengten meten.

"cA" = Totale omvang vanaf basis dig. 1 t/m basis dig. 5

"cA'" = Bij volwassenen minstens 6 cm proximaal van "cA"

"cX": Bij de teenbasis meten

Voor het exacte meten van de teenomvang adviseren wij het Juzo® Tyvek® vingermeetlint.

Bij open teenaanzetten: "cZ" op de plaats vaststellen waar het teendeel moet eindigen

Bij gesloten tenen: "cZ" bij de nagelriem meten.


## Lengtematen

"lAA'" = Minstens 6 cm bij volwassenen, bij kinderen kan dit korter gemeten worden

Lengten van "cX":

Bij open teenaanzetten: tot het gewenste einde van de aanzet meten (een minimumlengte van 1,5 cm is aan te bevelen).

Bij gesloten tenen: van "cX" tot het uiteinde van de teen meten.

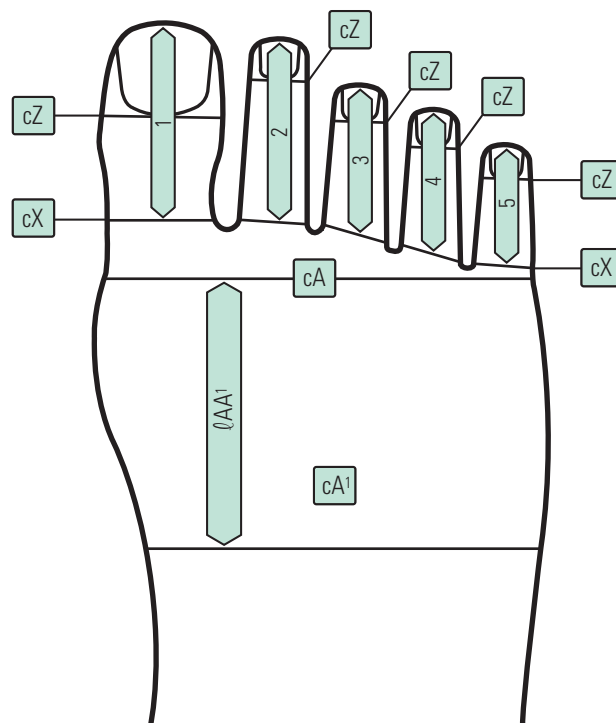

 = Omvangsmaten in cm       = Lengtematen in cm

Voor uw keuze voor en specifieke uitvoering verwijzen wij u naar de brochure Juzo® Expert speciale medische hulpmiddelen.