

## Handleiding exact maatnemen voor JuzoFlex® kniebandages / manchetten voor onderbeenprothesen

Zorg ervoor dat de knie bij het opnemen van de maten niet te ver wordt gestrekt.

### JuzoFlex® kniebandages

Meetpunten voor kniebandages op maat:

- Omvang "cD" = Minstens 12 cm onder het midden van de patella
- Omvang "cE" = Midden van de patella
- Omvang "cF" = Minstens 15 cm boven het midden van de patella

Ook bij maatwerk mogen de standaardlengten van de standaardproducten (zie prijslijst) niet worden overschreden om de therapeutische werking bij volwassen patiënten te garanderen.

Extra lengtematen zijn mogelijk. Geef hiervoor ook de gewenste omvangsmaten "cG" en "cC" en ook de respectievelijke afstand tot het midden van de knie "cE" op.


### Juzo® Expert manchetten voor onderbeenprothesen

Meetpunten voor manchetten voor onderbeenprothesen op maat (in standaardlengte):

- Omvang "cD" = 15 cm onder het midden van de patella
- Omvang "cE" = Midden van de patella
- Omvang "cF" = 15 cm boven het midden van de patella

Ook bij maatwerk mogen de standaardlengten van de standaardproducten niet worden overschreden om de therapeutische werking bij volwassen patiënten te garanderen.

Lange uitvoering is mogelijk. Geef hiervoor ook de gewenste omvang "cG", en de afstand tot het midden van de knie "cE" op.

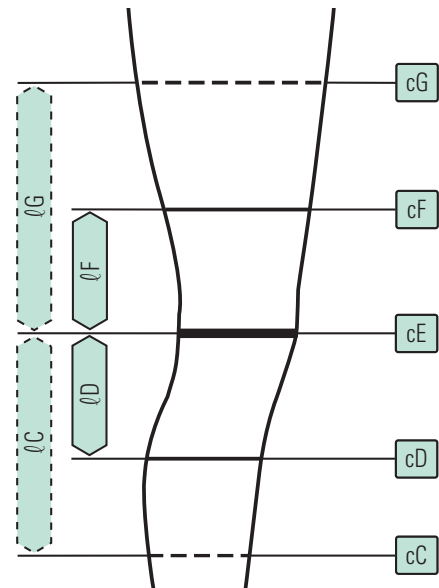


## Handleiding exact maatnemen voor JuzoFlex® spronggewrichtsbandages

Meetpunten voor spronggewrichtbandages:

- Omvang "cA" = Boven het basiscgewricht van de kleine teen
- Omvang "cY" = Boven het midden van de hiel – wreef (voet in een stand van 90°)
- Omvang "cB" = Smalste punt van de enkel

De lengtematen worden als volgt gemeten:

- Lengtemaat "lA" = Omvang "cA" tot aan het einde van de hiel = voetlengte
- Lengtemaat "lB" = Einde van de hiel tot het omvang "cB"

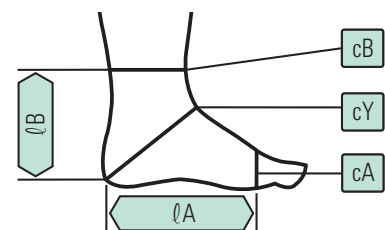

### Algemeen:

- Meet met een Juzo® maatband.
- Het meetlint moet tijdens het meten aangesloten zijn, maar mag niet in de huid snijden.
- Meet alle omvangsmaten zoveel mogelijk in een rechte hoek ten opzichte van het been (flexiestand).

 = Omvangsmaten in cm

 = Lengtematen in cm

**Maatwerk alleen in kleur Beige**