

Handleiding exact maatnemen voor Juzo® compressiestompkousen

Let op:

Om een correct drukverloop te garanderen, meet u de eerste omvang 5 cm proximaal van het uiteinde van de stomp. Vul deze omvang op de daarvoor gereserveerde plaats in op het maatblad. **Alle** daarboven liggende maten zijn nodig voor het leveren van de juiste bandage. Dit is afhankelijk van de door u gewenste bandage (zie schema).

Zorg ervoor dat u bij een heupbevestiging of lijfgedeelte de afmetingen volledig invult.


De lengtematen moeten vanaf het einde van de stomp worden gemeten.
Meet de lengten recht (loodrecht), leg het meetlint niet langs de stomp.
Eventueel moet u een meetlat gebruiken voor de exacte lengtemeting.

Bij een **stompcompressiekous** zijn de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:

- Een stompkous met één been: stuur hiervoor de maatschema's "stompkousen" en "compressiekousen/-panty's vlakbrei" samen op en voeg er een verwijzing bij.
- Een stompkous met twee benen. Leg alle maten tot "T" vast.
- Een stompkous met één been en een beenaanzet, hiervoor moet u ook de omtrek en lengtematen voor "F" en "G" aangeven.

Compressiestompkousen met lichaamsgordel (KT lichaamsgordel Juzo® Expert – hoogte 23 cm)

Leverbare maten	1	2	3	4	5
Passend bij lichaamsomvang	90	100	110	120	135

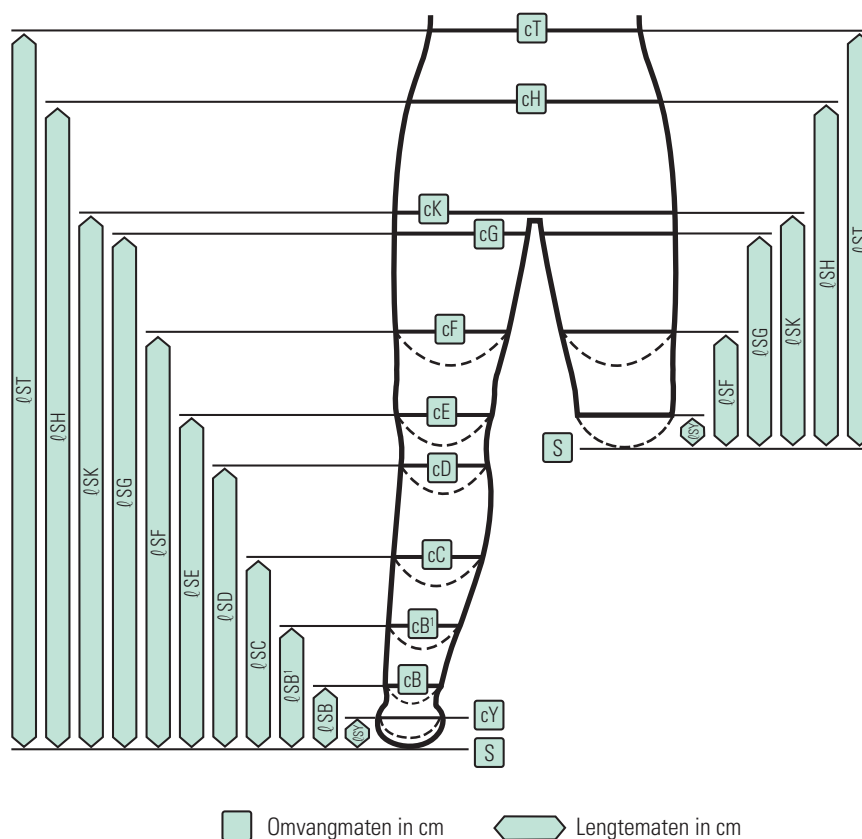

Voor uw keuze voor en specifieke uitvoering verwijzen wij u naar de brochure Juzo® Expert speciale medische hulpmiddelen.